


MEDITREND

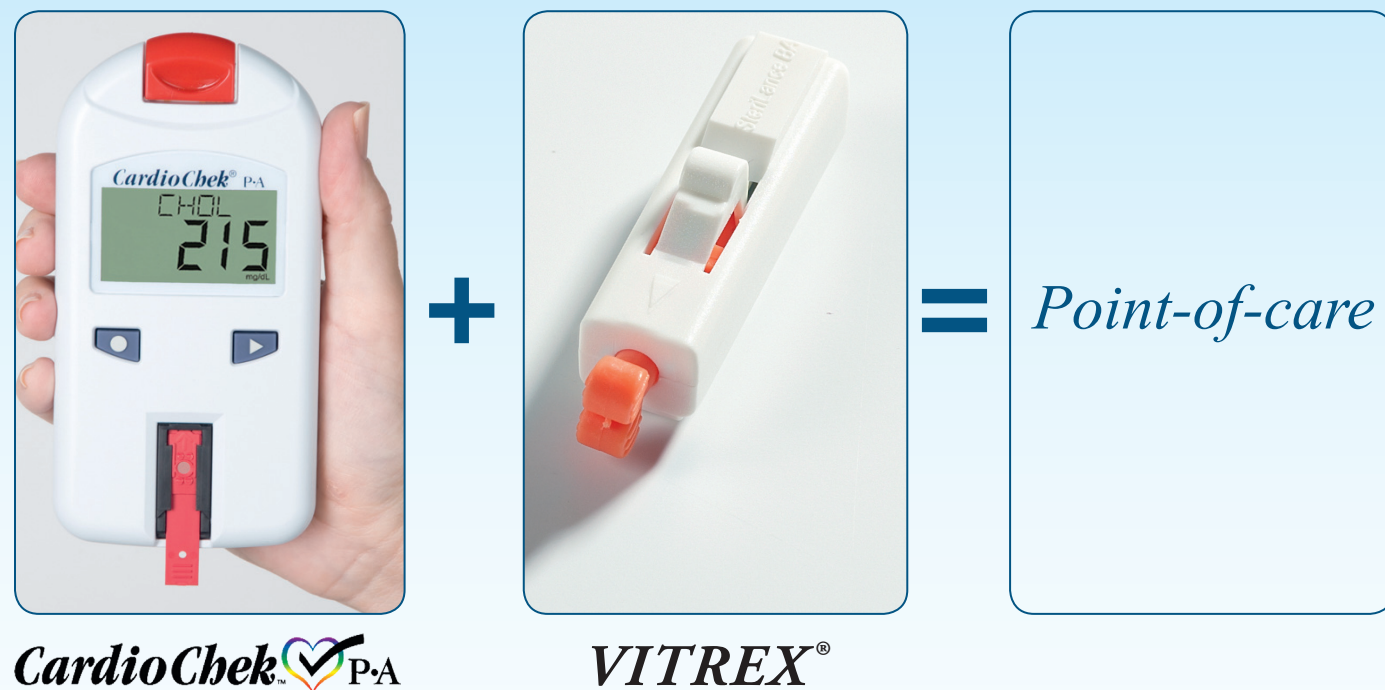

Биохимические экспресс-анализаторы крови **CardioChek** — классический образец диагностического оборудования «**point-of-care**» — **диагностики в месте наблюдения пациента**. Умеренная стоимость, точность и простота в обращении позволяет использовать **CardioChek** как специалистам, так и индивидуальным пользователям на дому.

В связи с приказом №302Н Минздравсоцразвития России об организации на территории РФ **Центров Здоровья** на базе лечебных учреждений с целью формирования у граждан здорового образа жизни, каждый **Центр Здоровья** должен быть оснащён биохимическим **ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРОМ** (позиция №6 списка необходимого оборудования, приложение №1 к приказу №302Н) для определения в крови пациента двух целевых параметров: общего холестерина и глюкозы.

В поддержку программы Минздравсоцразвития РФ по созданию и оснащению Центров Здоровья, компания **ЗАО «МедиТренд»**, являясь официальным представителем на территории РФ компании **Polymer Technology System** (PTS, США) — производителя экспресс-анализатора **CardioChek**, рада сообщить о беспрецедентном предложении по оснащению **Центров Здоровья**.

Все подробности Вы можете узнать, позвонив по телефону: +7(495) 223 3259.

117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30
Телефон/факс: +7(495) 223 3259
E-mail: info@meditrend.ru

ЛАНЦЕТЫ VITREX®

Сделано в Дании 

Безопасность и комфорт для пользователя и пациента.



VITREX® STERILANCE® Lite II




VITREX® STERILANCE® Press


Идеально подходят для получения капиллярной крови при проведении экспресс-тестов на холестерин и глюкозу, а также других диагностических *in vitro* тестов.

VITREX® STERILANCE® Lite II

Сделано в Дании 

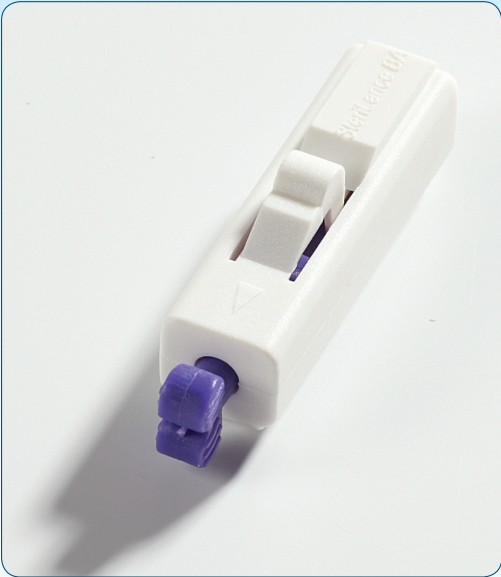

- Безопасность пользователя: игла находится внутри корпуса ланцета до и после использования.
- Безопасность пациента: ланцет предназначен только для одноразового применения, многократное использование невозможно. Игла стерилизована гамма-излучением.
- Удобство и комфорт пользователя: взведённая игла приводится в действие одним нажатием.
- Комфорт пациента: высококачественная ультра тонкая трёхгранная игла и высочайшая скорость прокола обеспечивают безболезненность процедуры.
- Эффективность: различные варианты игл и глубины прокола позволяют подобрать конфигурацию ланцета, обеспечивающую необходимый забор капиллярной крови для любых целей.

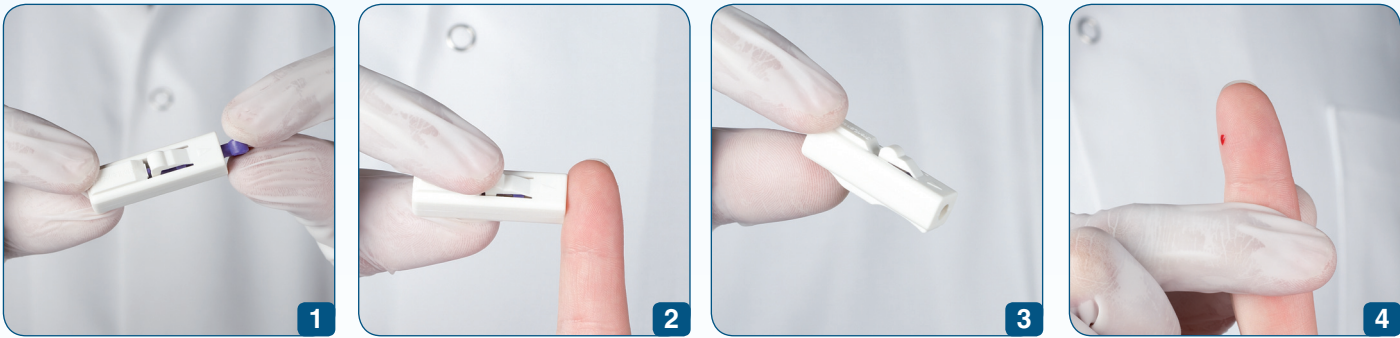

1. Скручивающим движением снимите защитный колпачок.
ВНИМАНИЕ: не используйте ланцет, если защитный колпачок не закреплён или повреждён.
2. Прижмите ланцет отверстием к необходимому месту прокола (рекомендуется боковая поверхность подушечки безымянного пальца, такое место прокола обеспечивает минимальный дискомфорт и максимальный кровоток). Удерживая ланцет крепко и ровно, нажмите на кнопку спуска иглы.
3. Выбросьте использованный одноразовый ланцет в предназначенный для этого контейнер.
4. Мягкими массирующими движениями вдоль пальца от основания в сторону прокола получите необходимый объём крови.

ВИДЫ ЛАНЦЕТОВ VITREX® STERILANCE® LITE II


Цветовой код	Тип иглы	Глубина прокола	Артикул	Применение
Зелёный	Лезвие 18G	1.8 мм	3731-13	Специально для пункции пятки и взятия крови у новорожденных детей.
Сиреневый	Игла 28G	1.8 мм	3741-13	Взятие крови из пальца у взрослых людей для определения глюкозы и проведения иных экспресс-тестов.
Жёлтый	Игла 26G	1.8 мм	3751-13	
Голубой	Игла 26G	2.4 мм	3761-13	То же, что и выше, но для прокола грубой кожи у взрослых людей.
Оранжевый	Игла 21G	1.8 мм	3771-13	Для проведения анализов на гемоглобин, холестерин, газы крови, свёртываемость крови и других диагностических тестов.
Розовый	Игла 21G	2.4 мм	3781-13	То же, что и выше, но для прокола грубой кожи у взрослых людей.

VITREX® STERILANCE® Press

Сделано в Дании 



- Безопасность пользователя: игла находится внутри корпуса ланцета до и после использования.
- Безопасность пациента: ланцет предназначен только для одноразового применения, многократное использование невозможно. Игла стерилизована гамма-излучением.
- Удобство и комфорт пользователя: взведённая игла приводится в действие в результате прижатия ланцета к месту прокола, таким образом гарантируется качественный прокол.
- Комфорт пациента: высококачественная ультра тонкая трёх- или двухгранная игла и высочайшая скорость прокола обеспечивают безболезненность процедуры.
- Эффективность: различные варианты игл и глубины прокола позволяют подобрать конфигурацию ланцета, обеспечивающую необходимый забор капиллярной крови для любых целей.

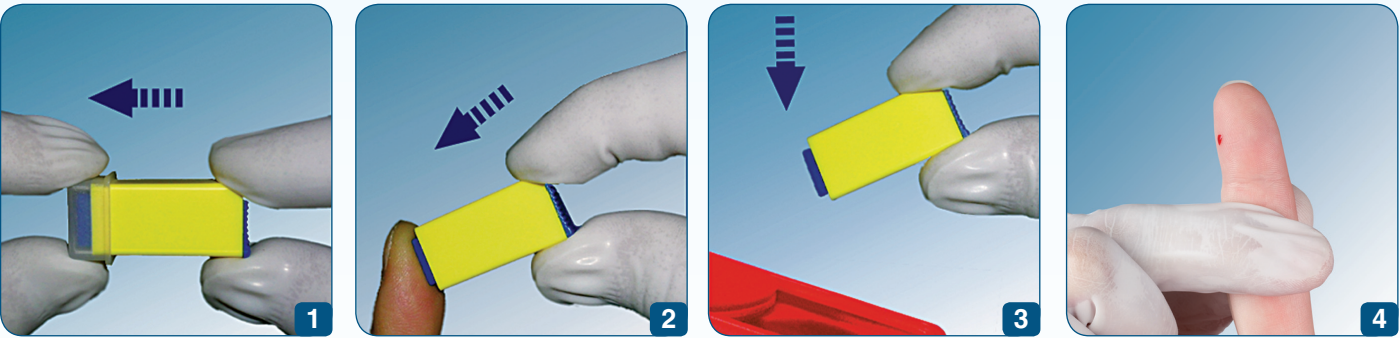

1. Аккуратным движением снимите защитный колпачок.
ВНИМАНИЕ: не используйте ланцет, если защитный колпачок не закреплён или повреждён.
2. Прижмите (не надавливайте) ланцет отверстием к необходимому месту прокола (рекомендуется боковая поверхность подушечки безымянного пальца, такое место прокола обеспечивает минимальный дискомфорт и максимальный кровоток). Удерживая ланцет крепко и ровно, уверенным движением надавите ланцет на место прокола.
3. Выбросьте использованный одноразовый ланцет в предназначенный для этого контейнер.
4. Мягкими массирующими движениями вдоль пальца от основания в сторону прокола получите необходимый объём крови.

ВИДЫ ЛАНЦЕТОВ VITREX® STERILANCE® Press

Цветовой код	Тип иглы	Глубина прокола	Артикул	Применение
Зелёный	Лезвие 18G	1.8 мм	3931-13	Специально для пункции пятки и взятия крови у новорожденных детей.
Жёлтый	Игла 26G	1.8 мм	3941-13	Взятие крови из пальца у взрослых людей для определения глюкозы и проведения иных экспресс-тестов.
Оранжевый	Игла 21G	2.2 мм	3951-13	Для проведения анализов на гемоглобин, холестерин, газы крови, свёртываемость крови и других диагностических тестов.
Розовый	Игла 21G	2.8 мм	3761-13	То же, что и выше, но для прокола грубой кожи у взрослых людей.